

QUALE MODELLO DEVO SCEGLIERE ?


Ecco la guida delle taglie e le istruzioni su come trovare il modello giusto per la vostra mascella:



1. Stampare questa pagina e mantenere la pagina 2 sullo schermo.



2. Ritagliare con le forbici le linee blu indicate sui due modelli sottostanti.

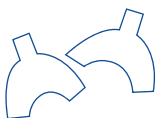

3. In questo modo si ottengono 2 fogli: uno per una per SomnoFit-S, l'altra per SomnoFit-B.





4. Inserire il foglietto in bocca alla base della mascella e in la direzione della freccia. Assicurarsi di centrare e allineare lo schizzo del bite sulla mascella.


5. Utilizzando i diagrammi a pagina 2 come guida, confrontate le lastre. Scegliete quindi il modello che corrisponde meglio alla larghezza della vostra mascella. I denti (molari) devono entrare nel boccaglio.

6. Ordinare il modello giusto e godere di un sonno tranquillo.


Somnofit®-S

Somnofit®-B

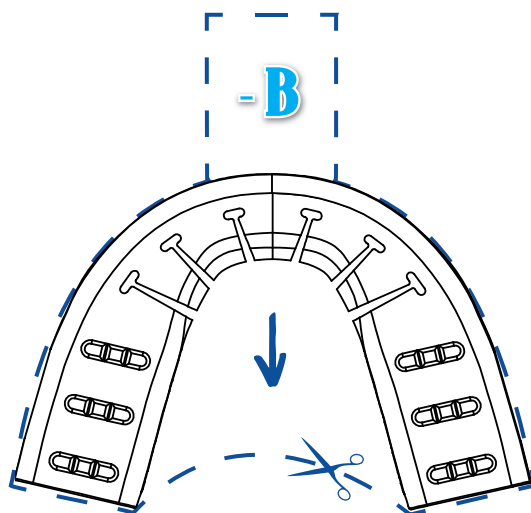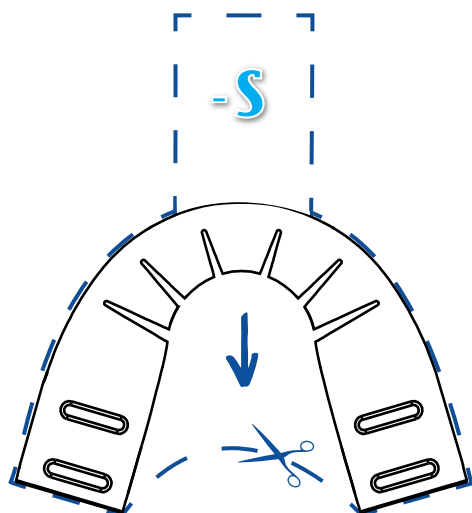


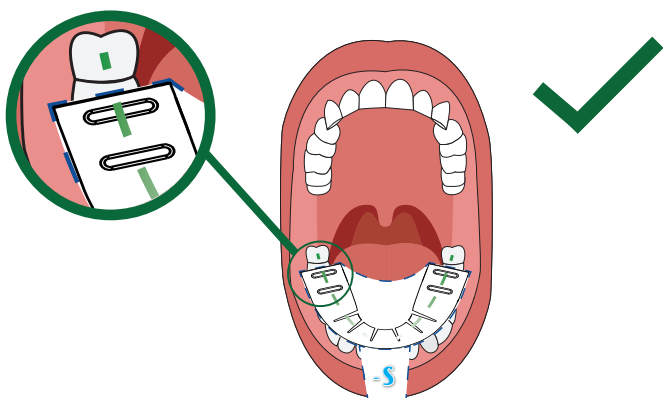


Se il bite SomnoFit-S è centrato sui molari, è possibile acquistare il bite SomnoFit-S.

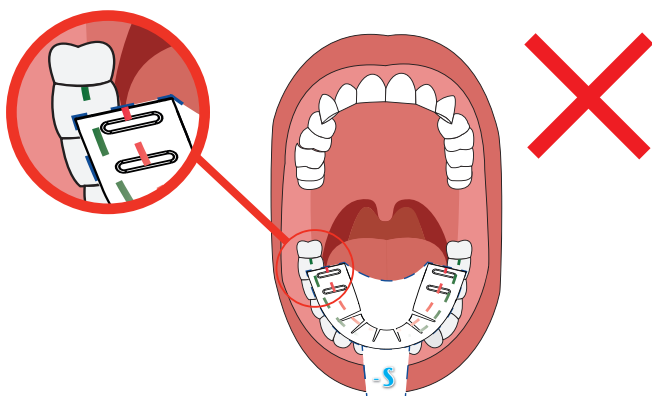

Se il foglio del boccaglio SomnoFit-S è più piccolo dell'arco dentale e/o non è centrato sui molari, eseguire l'esercizio con il porta impronte SomnoFit-B.

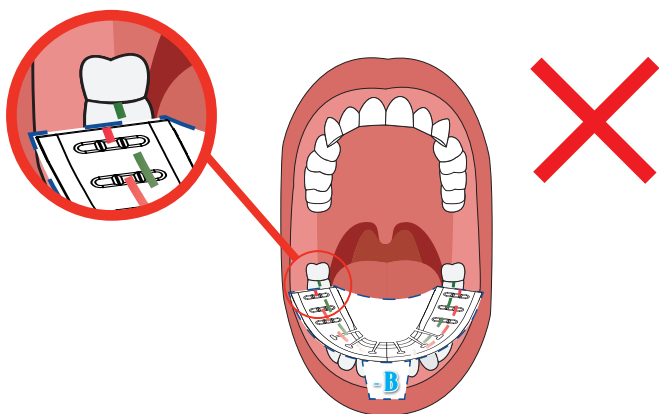

Se il foglio del boccaglio SomnoFit-B è più grande dell'arcata dentale e/o arco dentale sui molari, eseguire l'esercizio con il porta impronte SomnoFit-S.

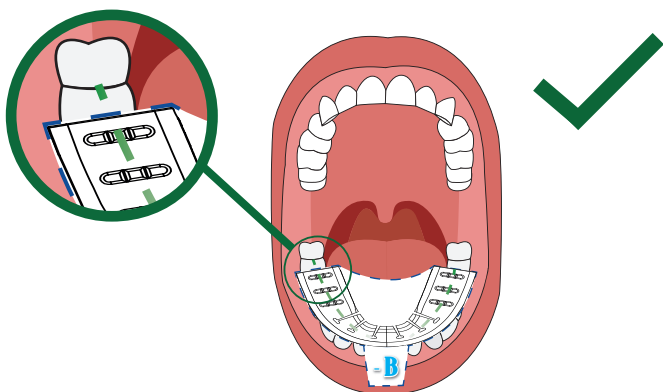

Se il foglio del boccaglio SomnoFit-B è centrata sui molari è possibile acquistare il bite SomnoFit-B.

In caso di dubbio o se entrambi i fogli del boccaglio sembrano essere adatti, acquistate il bite SomnoFit-S. In effetti, l'80% dei nostri utenti sceglie.

Il modello SomnoFit-S. SomnoFit-B è riservato alle mascelle più grandi.