

## COMMENT ADAPTER MON ANCIEN BOÎTIER À LA NOUVELLE CEINTURE ?

1 Équipez-vous d'un tournevis Torx T8.



2 Retournez l'appareil électronique du côté des clips.



3 Dévissez délicatement les clips.



4 Retirez les clips.



5 Revisser l'appareil délicatement.



6 Veillez à bien serrez les vis, de sorte qu'elles ne dépassent pas.



7 Insérez le dispositif électronique dans la poche arrière de la nouvelle ceinture.



**NOUVELLE  
CEINTURE PRÊTE  
À L'EMPLOI !**