

PosiForm®-Belt

Sehr einfache Anwendung ✓
Verstellbare Vibrationsintensität ✓
Einheitsgrösse ✓

Vibrationsgürtel zur Behandlung von Positionsabhängiger Schlafapnoe und rückenlagebedingtem Schnarchen
Ihr Coach für ruhigere und erholsamere Nächte!


FUNKTIONSPRINZIP

Es ist bekannt, dass das Schlafen auf dem Rücken Schnarchen und Atemaussetzer begünstigt. Der PosiForm-Gürtel ist eine einfache und effektive Lösung. Er besteht aus einem intelligenten elektronischen Lerngerät und einem bequemen Brustgurt. Das Gerät vibriert, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass er auf dem Rücken schläft. Wenn er auf diese Weise alarmiert wird, kann er sich auf die Seite rollen und so die Vibrationen und das Schnarchen stoppen. Nach nur wenigen Nächten schläft der Benutzer ganz natürlich auf der Seite.

Der flexible schweißhemmende Gürtel wird über der Unterwäsche um die Brust oder Taille getragen. Der weiche und bequeme Gürtel wird um den Brustkorb oder die Taille über der Unterwäsche getragen. Die Anwendung ist einfach und die Vibration ist in 7 Stufen einstellbar.

HOCHRISIKO-POSITION FÜR SCHNARCHEN UND APNOE

Der PosiForm-Gürtel erkennt Hochrisikopositionen und eine Vibrationswarnung informiert Sie darüber, dass Sie sich auf die Seite rollen sollten.

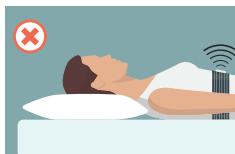

IDEALE VORBEUGENDE POSITION ZUR REDUZIERUNG DES SCHNARCHENS

Der PosiForm-Gürtel überwacht Sie und warnt Sie, wenn Sie sich in einer Hochrisikoposition befinden.



Indikationen

Lagertherapie von rückenlagebedingtem Schnarchen/Schlafapnoe. Das Gerät signalisiert durch Vibrieren eine schnarch-/apnoefördernde Rückenlage, bis der Positionswechsel in die Seiten- oder Bauchlage erfolgt.

Kontraindikationen

Trägern eines Herzschrittmachers ist die Benutzung des Geräts untersagt.

WIRKSAMKEIT

Der PosiForm-Belt reduziert effektiv positionsbedingtes Schnarchen und Apnoe dank Vibrationen, die in Rückenlage ausgelöst werden. Sein komfortables, diskretes und anpassbares Design ermöglicht eine einfache und nicht-invasive Anwendung jede Nacht.

Inhalt

Ref. P-01

- 1 intelligentes elektronisches Anti-Schnarch-Gürtelgerät
- 1 Gürtel
- 2 AAA-Batterien
- Gebrauchsanweisung



Medizinprodukt

