

# PosiForm®-Belt

Cinturón electrónico antirronquidos  
y contra la apnea posicional

**Un entrenador para disfrutar de noches apacibles y reparadoras**

Muy fácil de utilizar ✓  
Intensidad de vibración regulable ✓  
Talla única ✓

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO


Es sabido que dormir boca arriba favorece los ronquidos y la apnea. El cinturón PosiForm-Belt es una solución sencilla y eficaz. Consta de un dispositivo electrónico de aprendizaje inteligente y de un cómodo cinturón torácico. El dispositivo emite una vibración que alerta al usuario cuando duerme boca arriba. Advertido de este modo, puede girarse a un lado y poner fin a la vibración y al ronquido. Tras apenas unas cuantas noches, dormirá de lado de forma natural.

El cinturón, flexible y antitranspirante, se coloca alrededor del tórax o de la cintura, directamente sobre la piel o sobre la ropa interior. PosiForm-Belt lleva 2 pinzas con las que también es posible fijar el dispositivo al cuerpo sin cinturón, directamente sobre una prenda interior.

El cinturón suave y cómodo se lleva alrededor del tórax o la cintura, sobre la ropa interior. Su uso es sencillo y la vibración se puede ajustar en 7 niveles.

## POSICIÓN DE RIESGO PARA EL RONQUIDO O LA APNEA

PosiForm-Belt detecta una postura de riesgo. Una vibración indica que es preciso girarse a un lado.

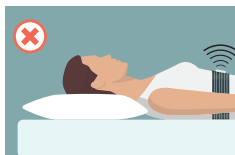

## POSICIÓN PREVENTIVA IDEAL PARA LIMITAR EL RONQUIDO

PosiForm-Belt permanece alerta y reacciona en cuanto se adopta una postura de riesgo.



## Indicaciones

Tratamiento postural para la roncopatía/apnea en posición supina. El aparato empieza a vibrar cuando el paciente duerme boca arriba (posición en la que la roncopatía/apnea es más probable) para alertarle de que debe ponerse de lado o boca abajo.

## Contraindicaciones

Aparato estrictamente prohibido para personas con marcapasos.

## EFICACIA

PosiForm-Belt reduce eficazmente los ronquidos y la apnea posicional gracias a las vibraciones que se activan en posición dorsal. Su diseño cómodo, discreto y personalizable permite un uso sencillo y no invasivo cada noche.



## Contenido

Ref. P-01

- 1 módulo inteligente de tratamiento postural
- 1 cinturón ajustable
- 2 pinzas de fijación regulables
- 2 pilas tamaño AAA
- Instrucciones de uso

Producto sanitario

