

# PosiForm®-Belt

Cintura elettronica anti-russamento  
e anti-apnea posizionale

**L'alleato ideale per un sonno tranquillo e riposante!**


## FUNZIONAMENTO

È noto che dormire sulla schiena favorisce il russamento e l'apnea. PosiForm-Belt è una soluzione semplice ed efficace, composta da un dispositivo elettronico di apprendimento intelligente e da una comoda cintura toracica. Il dispositivo emette una vibrazione quando il paziente dorme sulla schiena, inducendolo a cambiare posizione. Non appena il paziente si gira su un fianco, il russamento cessa e la vibrazione si interrompe. Dopo qualche notte, il paziente si sarà abituato a dormire spontaneamente sul fianco.

La cintura morbida e confortevole si indossa attorno al torace o alla vita, sopra la biancheria intima. È facile da usare e la vibrazione è regolabile su 7 livelli.

## POSIZIONI AD ALTO RISCHIO DI RUSSAMENTO E APNEA

PosiForm-Belt rileva le posizioni ad alto rischio ed emette una vibrazione che segnala al paziente di girarsi su un fianco.

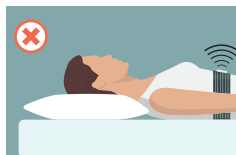

## POSIZIONE PREVENTIVA IDEALE PER RIDURRE IL RUSSAMENTO

PosiForm-Belt monitora la posizione del paziente e lo avverte quando è ad alto rischio di russamento e apnea.



## Indicazioni

Permette la terapia posizionale del russamento / dell'apnea quando si dorme sulla schiena. L'apparecchio emette una vibrazione quando si assume la posizione dorsale che favorisce il russamento/l'apnea, indicando che occorre girarsi sul fianco o sulla pancia.

## Controindicazioni

Apparecchio formalmente vietato ai pazienti portatori di stimolatore cardiaco (pacemaker).

## EFFICACIA

La PosiForm-Belt riduce efficacemente il russamento e l'apnea posizionale grazie alle vibrazioni attivate in posizione supina. Il suo design confortevole, discreto e personalizzabile consente un uso semplice e non invasivo ogni notte.



## Contenuto della confezione

Rif. P-01

- 1 dispositivo elettronico intelligente anti-russamento applicabile alla cintura
- 1 cintura regolabile
- 2 clip di fissaggio regolabili
- 2 batterie AAA
- Istruzioni per l'uso

Dispositivo medico

